

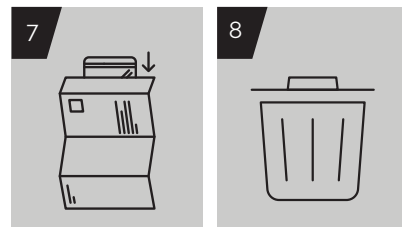
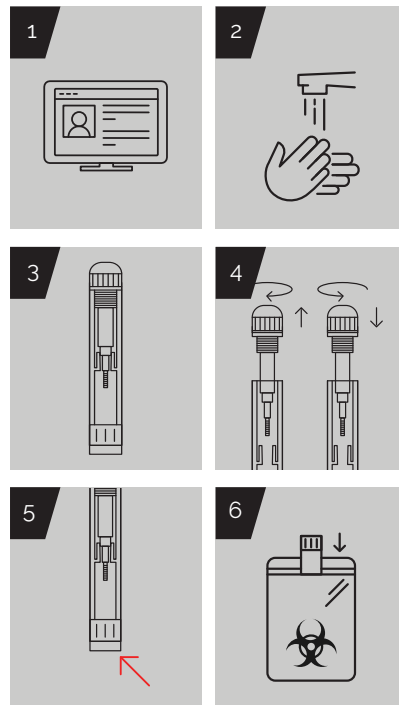
## Informazioni sul kit

-  Dispositivo medico in vitro
-  Produttore
-  Conformità europea
-  Data di scadenza
-  Contiene 1 kit
-  Materiale carta
-  Esclusivamente monouso
-  Numero articolo
-  Riciclo
-  Istruzione per l'uso
-  Conservare a una temperatura tra 2°C e 30°C

 **Lab Evo S.r.l.**  
Via Francesco Caracciolo 26  
20154 Milano Italia

 Raccolta differenziata.  
Verifica le disposizioni  
del tuo comune.

## Istruzioni d'uso kit feci



- 1 Accedere al sito **web [www.lab-evo.com](http://www.lab-evo.com)**, selezionare «Attiva il kit», compilare i campi indicati e seguire le istruzioni.
- 2 Lavare le mani sotto acqua corrente.
- 3 La provetta per l'analisi del sangue occulto nelle feci (FOB) viene consegnata con il campionatore immerso in una soluzione che ne garantisce la stabilità.
- 4 Raccolta del campione. Il campionatore è di facile utilizzo, basta svitare il tappo verde e prelevare un campione. Il tubo si chiude ermeticamente per garantire la stabilità del campione fino a 7 giorni.
- 5 Assolutamente **non** svitare l'altro tappo, quello bianco.

- 6 Inserire la provetta con il campione di feci nella Biohazard bag per il trasporto. Segnarsi il numero riportato sulla provetta, che servirà per attivare il test! Sigillare con cura.
- 7 Inserire la Biohazard bag contenente la provetta con il campione di feci nella scatola Lab Evo. Inserire la scatola nella busta per la spedizione.
- 8 Inserire le componenti usate del kit per il test nel sacchetto di plastica e gettarle nei rifiuti domestici.

## Avvertenze

- Ogni provetta deve essere inserita in una Biohazard bag diversa.
- Conservare il kit lontano dalla portata dei bambini.
- Il kit può essere utilizzato esclusivamente da adulti con età dai 18 anni in su. Inserire le componenti usate del kit per il test nel sacchetto di plastica e gettarle nei rifiuti domestici.

**Questo kit non è riutilizzabile**

Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail all'indirizzo [support@lab-evo.com](mailto:support@lab-evo.com) o visitare la pagina di assistenza del nostro sito web all'indirizzo [www.lab-evo.com](http://www.lab-evo.com).



PIEGHEVOLE INFORMATIVO

## ISTRUZIONI PROVETTE ESAME URINE ED ESAME FECI



Comodità



Facilità





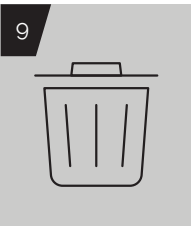

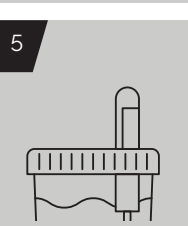
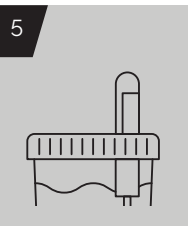
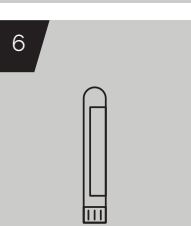
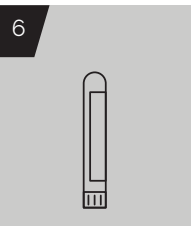


Affidabilità



Rapidità

live better, live longer

<div>Il kit esame urine contiene:</div>	<div>Informazioni importanti</div>	<div>Istruzioni d'uso kit urine</div>			<div>Avvertenze</div>
<div> <div>1 Vasetto tondo</div> <div>1 Provetta da 9 ml</div> <div>1 Biohazard bag per il trasporto</div> <div>1 Busta preaffrancata</div> <div>1 Codice sulla provetta per attivazione KIT</div> </div>	<div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Il campione andrebbe prelevato tra il lunedì (e non oltre il giovedì) e inviato il giorno stesso.</li> <li>Non spedire quando ci sono ponti o festività.</li> <li>Prima di effettuare il prelievo, attivare il kit e prenotare il ritiro.</li> </ul> </div>	<div> <div>1</div> <div>2</div> </div>	<div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div>	<div> <div>5</div> <div>Capovolgere la provetta da 9 ml (tappo bianco) e inserirla nel foro presente sul coperchio del contenitore giallo, esercitando una leggera pressione verso il basso.</div> <div>6</div> <div>L'urina raccolta andrà automaticamente a riempire la provetta (NB: il mancato riempimento è da ricondursi raccolta di un volume d'urina scarso o alla non idonea chiusura del contenitore giallo).</div> <div>7</div> <div>Inserire la provetta con l'urina nella Biohazard bag per il trasporto. Segnarsi il numero riportato sulla provetta, che servirà per attivare il test! Sigillare con cura.</div> </div>	<div>Ogni provetta deve essere inserita in una Biohazard bag diversa.</div> <div>Conservare il kit lontano dalla portata dei bambini.</div> <div>Il kit può essere utilizzato esclusivamente da adulti con età dai 18 anni in su. Inserire le componenti usate del kit per il test nel sacchetto di plastica e gettarle nei rifiuti domestici.</div>
<div>Il kit esame feci contiene:</div>	<div>Informazioni sul kit</div>				<div>Questo kit non è riutilizzabile</div>
<div> <div>1 Provetta per l'analisi del sangue occulto</div> <div>1 Biohazard bag per il trasporto</div> <div>1 Busta preaffrancata</div> <div>1 Codice sulla provetta per attivazione KIT</div> </div>	<div> <div></div> <div>Leggere le Istruzioni per l'uso attentamente prima di iniziare a seguire i passaggi indicati.</div> </div>	<div> <div>3</div> <div>5</div> <div>4</div> <div>6</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>Accedere al sito <b>web <a href="http://www.lab-evo.com">www.lab-evo.com</a></b>, selezionare «Attiva il kit», compilare i campi indicati e seguire le istruzioni.</div> <div>2</div> <div>Lavare le mani sotto acqua corrente.</div> <div>3</div> <div>Raccogliere il primo mitto d'urina nel vasetto tondo (tappo giallo), dopo accurata igiene, senza toccare l'interno del contenitore.</div> <div>4</div> <div>Chiudere bene il contenitore.</div> </div>	<div> <div>8</div> <div>Inserire la Biohazard bag contenente la provetta con l'urina nella scatola Lab Evo. Inserire la scatola nella busta per la spedizione.</div> <div>9</div> <div>Inserire le componenti usate del kit per il test nel sacchetto di plastica e gettarle nei rifiuti domestici.</div> </div>	<div>Per qualsiasi domanda, inviare un'e-mail all'indirizzo <a href="mailto:support@lab-evo.com">support@lab-evo.com</a> o visitare la pagina di assistenza del nostro sito web all'indirizzo <a href="http://www.lab-evo.com">www.lab-evo.com</a>.</div>